

INFORME SOBRE PRODUCTO

ACTUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO DE ORTODONCIA 2016 Y LISTA DE PRECIOS

BRACKETS GHIACCIO MBT

Los Nuevos brackets Ghiaccio MBT conjugan la excepcional transparencia y dureza del **Zafiro monocristalino biomédical**, con lo que están realizados, con sofisticadas características que los vuelven los brackets estéticos ideales para satisfacer las modernas exigencias biomecánicas, cosméticas y de confort.

Se unen a los brackets Ghiaccio sistema ROTH ya presentes a página 99 del Catálogo de Ortodoncia 2016.

Código	Descripción	Cantidad por confección	P.V.P
Arco Superior			
F5521-02	BKT GHIACCIO 22 T+17 A+4 CENT SUP DER	1	11,50 €
F5521-03	BKT GHIACCIO 22 T+17 A+4 CENT SUP IZQ	1	11,50 €
F5522-02	BKT GHIACCIO 22 T+10 A+8 LAT SUP DER	1	11,50 €
F5522-03	BKT GHIACCIO 22 T+10 A+8 LAT SUP IZQ	1	11,50 €
F5513-02	BKT GHIACCIO 22 T-7 A+8 CAN SUP DER GB	1	11,50 €
F5513-03	BKT GHIACCIO 22 T-7 A+8 CAN SUP IZQ GB	1	11,50 €
F5619-02	BKT GHIACCIO T-7 PREM SUP DER GB	1	11,50 €
F5619-03	BKT GHIACCIO T-7 PREM SUP IZQ GB	1	11,50 €
Arco Inferior			
F5520-06	BKT GHIACCIO22 T-6 ANT INF DER	1	11,50 €
F5520-07	BKT GHIACCIO22 T-6 ANT INF IZQ	1	11,50 €
F5513-06	BKT GHIACCIO 22 T-6 A+3 CAN INF DER GB	1	11,50 €
F5513-07	BKT GHIACCIO 22 T-6 A+3 CAN INF IZQ GB	1	11,50 €
F5514-06	BKT GHIACCIO 22 T-12 A+2 1er PREM INF DER GB	1	11,50 €
F5514-07	BKT GHIACCIO 22 T-12 A+2 1er PREM INF IZQ GB	1	11,50 €
F5515-06	BKT GHIACCIO 22 T-17 A+2 2o PREM INF DER GB	1	11,50 €
F5515-07	BKT GHIACCIO 22 T-17 A+2 2o PREM INF IZQ GB	1	11,50 €

Código	Descripción	Cantidad por KIT	P.V.P
KIT BRACKETS GHIACCIO MBT			
F5520-20	KIT BKTS GHIACCIO 22 MBT 5/5 SUP-INF	20	180,00 €

INSTRUCCIONES para ACTIVAR EL DISYNTOR RAPIDO

Les informamos de los siguientes códigos de disyuntores rápidos en confección de 1 pieza, envasados después del 20 de febrero de 2017, además de la información de seguridad ya presente, contendrán también las nuevas instrucciones de uso adicionales para el paciente como la foto a continuación.

A0620-08
A0620-09
A0620-11
A0620-13

A2620-07
A2620-10
A2620-12

A0630-08
A0630-10
A0630-12

A0621-08
A0621-11

A3620-11
A3621-11

A0625-07
A0625-09



Dado que en nuestro almacén aplicamos el método de “primero en entrar, primero en salir”, muchos clientes seguirán recibiendo las confecciones sin las nuevas instrucciones. Para todas aquellas personas que las soliciten, en nuestra página web están disponibles las nuevas instrucciones en formato A4 se pueden imprimir y doblar:

La dirección para acceder es la siguiente:

<http://www.leone.it/servizi/qualita/Scheda-Attivazione-Espansore-Rapido.pdf>

Procedura attivazione domiciliare
Home Activation Procedure

For appliances to be used in the home, the following instructions should be followed. Read them carefully before use. (Fig. 1-2)
Crea un arco con i tuoi denti e premi il dito forte (Fig. 1-2)
Hold in the middle of the appliance. (Fig. 1-2)
Spingila in avanti in modo progressivo verso la parte anteriore della bocca. Sostienilo fino a percepire la forza di resistenza. Successivamente, allungala fino al movimento verso il dietro in direzione completa. (Fig. 3-4)
Steadily push the bar toward the back of the mouth until you feel the tension stop. Carefully remove the bar on a distance in complete. (Fig. 3-4)
The pressure will allow a further extension, rather than a further expansion.
Repeat as provided by clinician.

Istruzioni
per attivare l'espansore rapido del palato
Instructions
to activate the rapid palatal expander

Versione WEB